

**SHRIMP CHECK**

快速检测试剂盒  
rapid test kits .



全方位虾类疾病检测试剂盒系列，如今随手可得  
快速检测试剂盒 - WSSV . IMNV . YHV

# ShrimpCheck 快速检测试剂盒

## 您养的虾是否安全？

尽管全球养殖虾生产率迅速增长，各种层出不穷的虾病和流感病毒如白点综合征病毒(White Spot Syndrome Virus, WSSV)、黄头病毒(Yellow Head Virus, YHV)、以及传染性肌肉坏死病毒(Infectious Myonecrosis Virus, IMNV) 经已造成养殖虾业周期性的损失。此四种主要的传染病毒不仅对全球对虾养殖业带来不利影响，同时也造成严重的经济损失。

## 对虾疾病预防管理

为了减轻疫情所带来的经济损失风险，同时尽早发现被传染的可能性，使用快速有效的对虾疾病预防管理工具显得至关重要。除了预防疾病，它将扮演着虾苗选购、养殖管理、源头避免虾苗感染及拯救养殖虾场等多重角色！



## 为何选择 ShrimpCheck 快速检测试剂盒？

- **快速**  
20分钟内获得结果
- **操作简单**  
程序简单，无需技术人员操作
- **现场筛检**  
方便快捷的检测功能，节省您的时间
- **无需昂贵器材与耗材**  
不需要昂贵的设备或工具
- **具成本效益**  
可同时执行更多的测试，收集更多代表性的数据



## ShrimpCheck 快速检测试剂盒产品简介

我们自豪地推介新一代的ShrimpCheck虾类疾病快速检测试剂盒系列，采用免疫层析检测技术(ICT)，是市场上最具成本效益的虾病快速检测工具之一。使用ShrimpCheck快速检测试剂盒有助尽早发现初期感染，并在大体解剖确认疾病之前协助您实践基本的对虾养殖监测。这种易于使用的检测工具为虾养殖业提供了具实用性及自我检查的管道，并且适用于相关执法单位。

## 现场筛检，快捷方便

我们研发的快速检测试剂盒可简单、方便且快速地定性检测四种虾类疾病包括：白点综合征病毒(WSSV)、黄头病毒(YHV)、以及传染性肌肉坏死病毒(IMNV)。无需任何昂贵仪器与技术人员，加上操作程序简化快速，虾农可随时随地使用这些检测试剂盒，有助防止对虾受到病毒的侵害。

## 替代实验室检测

通过传统的PCR检测技术监测虾病将大大提高虾养殖场的营运成本。反之，较低成本的虾病快速检测试剂盒经济实惠，若在虾养殖场被全面应用，将减低虾病所造成的全球性损失。我们的快速检测试剂盒是基于经济有效的免疫层析检测原理，为繁杂与昂贵的PCR检测提供了潜在的替代方案。

## 白点综合征病毒(WSSV)快速检测试剂盒

白斑综合征病毒(White Spot Syndrome Virus, WSSV)是一种高感染性的病原体，能造成全球养殖对虾大量死亡。在被广泛养殖的对虾品种中，白点综合征病毒已被誉为最流行、波及范围最广和致死率最高的病原体类型。

### 产品说明:

ShrimpCheck白点综合征病毒(WSSV)快速检测试剂盒是一种基于免疫层析检测原理的检测工具，适用于定性检测对虾白点综合征病毒感染。

### 组件:

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 1. WSSV快速测试卡 (20个)   | 2. 缓冲液 (1瓶)        |
| 3. 微量离心管 (20支，一次性使用) | 4. 研磨棒 (20支，一次性使用) |
| 5. 滴管 (20支，一次性使用)    | 6. 使用说明书           |



## 黄头病毒(YHV)快速检测试剂盒

黄头病是由虾感染黄头病毒(Yellow Head Virus, YHV)引起的。此病毒是一种与冠状病毒和动脉病毒有关的正单链RNA病毒，曾发生在黑虎虾(*P. monodon*)和白掌虾(*P.vannamei*)中爆发。

### 产品说明:


ShrimpCheck黄头病毒(YHV)快速检测试剂盒是一种基于免疫层析检测原理的检测工具，用于定性检测虾类黄头病毒感染。

### 组件:


- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 1. YHV快速测试卡 (20个)    | 2. 缓冲液(1瓶)         |
| 3. 微量离心管 (20支，一次性使用) | 4. 研磨棒 (20支，一次性使用) |
| 5. 滴管 (20支，一次性使用)    | 6. 使用说明书           |



## WSSV & YHV 快速检测试剂盒的测定程序

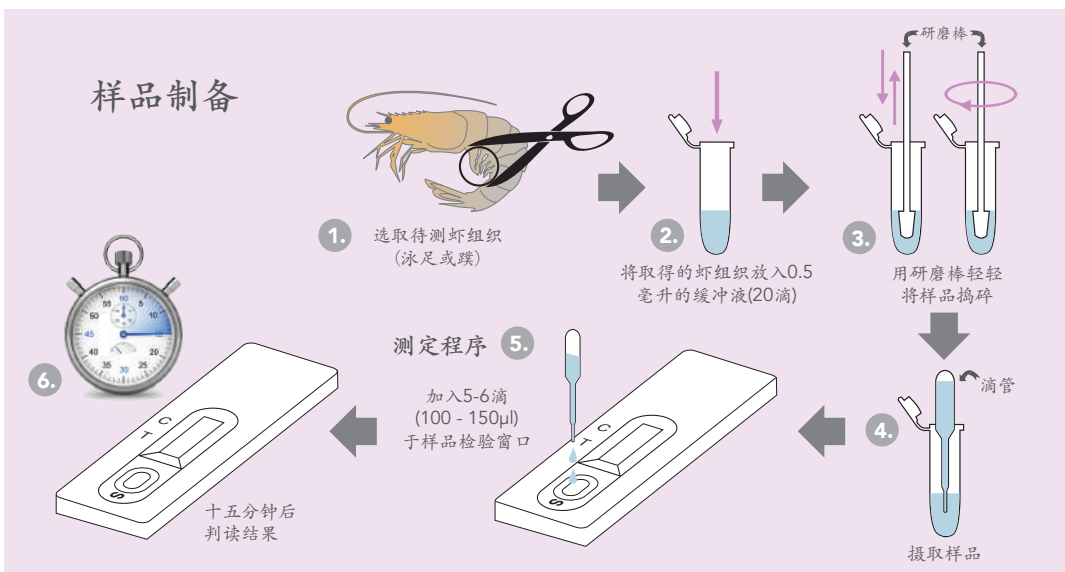

## 判读结果

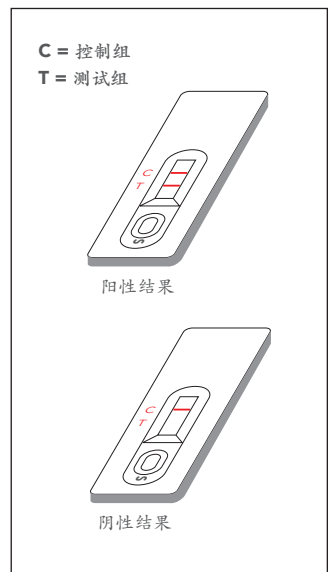

## 订购信息

产品编号	产品名称	包装
RWSS01-020	ShrimpCheck White Spot Syndrome Virus (WSSV) Rapid Test Kit	20 tests/ kit
RYHV01-020	ShrimpCheck Yellow Head Virus (YHV) Rapid Test Kit	20 tests/ kit

## 传染性肌肉坏死病毒(IMNV)快速检测试剂盒

传染性肌肉坏死病(IMNV)是对虾的一种病毒性疾病，由肌肉坏死病毒(Infectious Myonecrosis Virus, IMNV)引起。该病毒的基因组为单条长765bp的双链RNA分子，对虾是其主要感染及致死的主要宿主。

### 产品说明:


ShrimpCheck传染性肌肉坏死病毒(IMNV)快速检测试剂盒是一种基于免疫层析检测原理的检测工具，用于定性检测虾类传染性肌肉坏死病毒感染。

### 组件:

1. IMNV快速测试卡(20个)
2. 缓冲液(1瓶)
3. 微量离心管(20支，一次性使用)
4. 研磨棒(20支，一次性使用)
5. 滴管(20支，一次性使用)
6. 使用说明书



## IMNV 快速检测试剂盒的测定程序

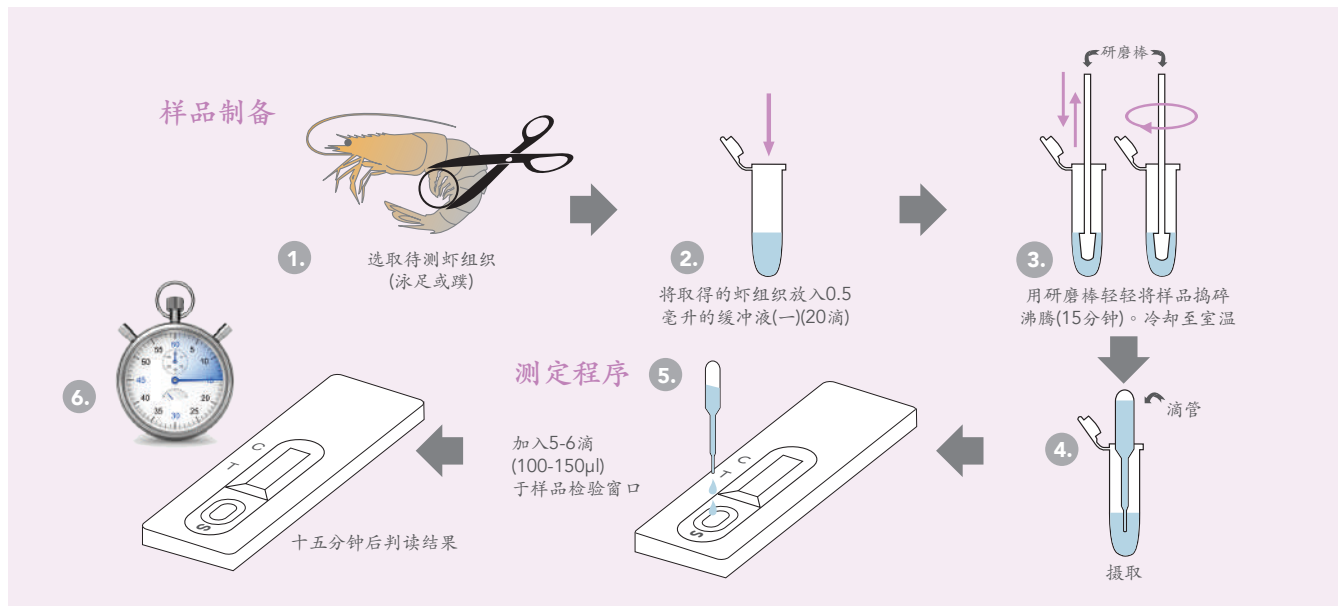

## 订购信息

产品编号	产品名称	包装
RIMN01-020	ShrimpCheck Infectious Myonecrosis Virus (IMNV) Rapid Test Kit	20 tests/ kit

Speedy Assay Sdn. Bhd. 200201018654 (586317-W)

### Headquarters

Revongen Corporation Center  
Level 17 • Top Glove Tower  
No. 16 • Persiaran Setia Dagang • Setia Alam • Seksyen U13  
40170 Shah Alam • Selangor Darul Ehsan • Malaysia.

t • +6 03 3359 1166  
f • +6 03 3358 0303  
e • info@speedyassay.com  
w • www.speedyassay.com

